

Kontakt

Sollten Sie noch Fragen zur Gewinnung einer Speichelprobe haben, würden wir uns über einen Anruf freuen.

Ihre Ansprechpartner:

Dr. rer. medic. Michael Böttcher

michael.boettcher@laborpraxis-dessau.de

Tel.: (0340) 5 40 53 - 72

Dipl.-Ing. (BA) Tanja Stahn

tanja.stahn@laborpraxis-dessau.de

Tel.: (0340) 5 40 53 - 72

MVZ Labor Dessau GmbH

Bauhüttenstraße 6


06847 Dessau-Roßlau

Tel.: (0340) 5 40 53 - 0

Fax: (0340) 5 40 53 - 58



Ein Unternehmen der Limbach Gruppe

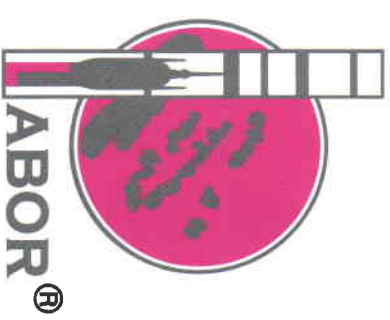


Anleitung

zur Gewinnung einer Speichelprobe

für die Drogen- / Medikamentenanalytik

mit dem Greiner Bio-One Sammelssystem



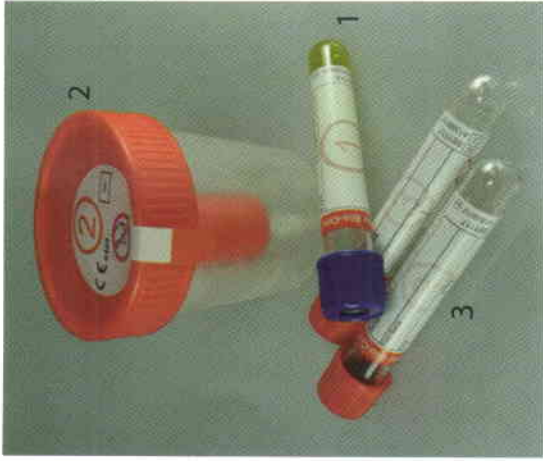

- Röhrchen (1) mit gelber Speichelsammellösung
- Becher (2) zum Hineinspucken des Speichels mit Speichelsammellösung
- 2 Röhrchen (3) mit Stabilisator zum Aufziehen der A- und B-Probe

→ Röhrchen (1) durch Abziehen der blauen Kappe öffnen und mit der gelben Speichelsammellösung die Mundhöhle für mindestens 2 Minuten spülen.

⚠ Die Speichelsammellösung ist nicht gesundheitsschädlich!



- Becher (2) aufschrauben und den gesamten Mundinhalt hineinspucken, anschließend wieder zuschrauben.
- Den Sicherheitsaufkleber abziehen und den Becher gerade halten, so dass das Ende des Ansaugstutzens in die Flüssigkeit eintaucht.



- Beide Röhrchen (3) für A- und B-Probe verwenden.
- ⚠ Bitte nicht öffnen!
- Röhrchen (3) mit der Kappe nach unten fest in die Öffnung des Bechers stecken.
- Die Röhrchen befüllen sich durch das Vakuum selbstständig.



- Mit dem zweiten Röhrchen (3) ebenso verfahren, anschließend beide Proben mehrmals schwenken.
- Sollten sich die Röhrchen nicht selbstständig befüllen, den Deckel des Bechers etwas lockern.

- Beide befüllte Röhrchen mit einem Barcode versehen und schnellst möglich zum Labor senden.
- Eine Lagerung im Kühlschrank ist möglich.

